

## minirò H-net Evo

带有USB端口和SecurScan数据上传软件的  
完全可验证ISO 11607.2连续式医用封口机

Gandus Saldatrici为所有寻求完全符合ISO标准的基本医用密封剂的CSSD和工业公司带来了一场革命。

新款MiniRò H-Net Evo现在提供两项重要升级：

### USB端口

由于使用了简单的U盘，它可以在完全符合可追溯性要求的情况下工作

以快速的方式  
以简单的方式  
以安全的方式

避免昂贵的专用硬件

在U盘上导出可追溯性数据，然后以数字或纸质格式存储。

USB端口还允许简单、快速和安全的软件更新您的封口机。您只需将新软件版本上传到U盘，然后将其下载到Sealer。





Date	Hour	Firmware	Id.sealer	Id.pouch	T (°C)	S (m/min)	F (N)	Batch	Oper.	Alarm
30/10/2015	09.33.36	1	1	0002A	159	008.0	084.2	B 010768	KAREN	0
30/10/2015	09.33.39	1	1	0002B	158	008.0	087.6	B 010768	KAREN	0
30/10/2015	09.33.55	1	1	0002C	156	008.0	089.3	B 010768	KAREN	0
30/10/2015	09.33.56	1	1	0002D	155	008.0	090.2	B 010768	KAREN	0
30/10/2015	09.33.58	1	1	0002E	155	008.0	089.0	B 010768	KAREN	0
30/10/2015	09.34.02	1	1	0002F	155	008.0	087.5	B 010768	KAREN	12
30/10/2015	09.34.23	1	1	0002G	158	008.0	086.8	B 010768	KAREN	0
30/10/2015	16.19.04	1	1	30	156	008.0	084.0	B 010768	KAREN	0
30/10/2015	16.19.26	1	1	31	157	008.0	083.8	B 010768	KAREN	0

### SecureScan数据上传软件

简单且极其安全的数据上传软件，能够读取定制的包装数据，并自动设置合适的机器功能和参数。

SecurScan数据上传软件允许您通过一个极其安全和简单的数据上传软件来完全操作它，能够读取定制的包装数据并自动设置合适的机器功能和参数。

该系统在任何PC上安装都非常简单。

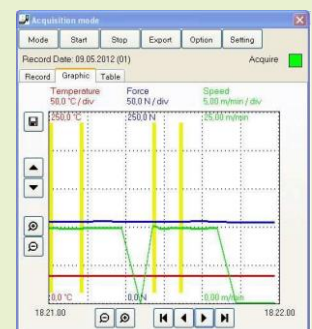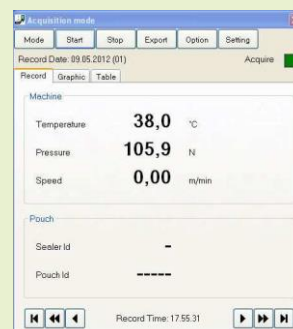

## minirò H-net Evo

带有USB端口和SecurScan数据上传软件的  
完全可验证ISO 11607.2连续式医用封口机

串行端口RS232支持与标签打印机和条形码扫描仪的接口。

打印数据可以通过代码存储在机器上，并直接从内存中调用。

根据验证ISO 11607.2监测所有密封参数。

根据DIN 58953.7: 2010指令进行密封。带1行打印功能的集成打印机。

由于扩展的字母数字键盘和明亮的4行显示屏，用户界面友好。

附件:

PS 654 工作平台

RL 80 滚轮平台

带切割装置的PR H40/H50筒卷支架

PRN 2000标签打印机

SecurScan数据上传系统

完全符合ISO 11607.2标准

型号	minirò H-net Evo
密封种类	连续式
封口宽度	15 (多线)
可密封材料	EN 868-5袋子/筒卷、Tyvek® 袋、EN 868-4纸袋、插角袋、层压铝袋、PP袋
ISO 11607.2验证	是的
符合EN 868-5	是的
DIN 58953-7: 2010指令	是的
打印机	内置的
接口	1个串行端口RS232, 1个USB端口
外形尺寸 (mm) / 重量 (kg)	554 x 270 x 222 / 18,5

